

A Z L A

BREATHING EARPLUGS




POM1000

イヤープラグ使用方法

※POM1000には、基本的にMAX StandardイヤークイーンM sizeが装着されています。(効果的に騒音を遮断するために、必ず耳のサイズに合うイヤークイーンに交換してください)
※ご使用前に必ずマニュアルを読み、指示に従ってください。

付属品

- A.イヤープラグ本体
- B.携帯用ケース
- C~D.プレミアムイヤークイーン
- E.イヤープラグストラップ
- F.使用マニュアル
- G.保管用ポーチ

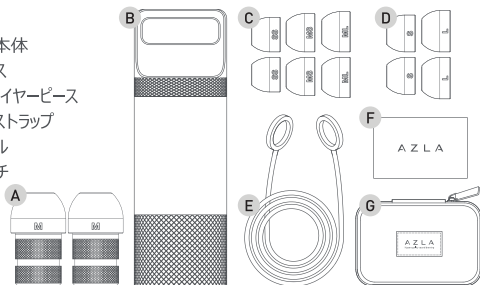

- 1.イヤークイーンをイヤープラグ本体に装着後、PNC(Passive Noise Cancelling)が最も効果的なサイズを選びます。
- 2.周囲の騒音がもっとも少なくなったと感じるサイズをお選びください。
- 3.耳の体温がイヤークイーンに十分伝わると温度に反応し、密着するように変形します。



耳への圧迫防止機能「エアホール」

圧力による痛み及び耳の中の健康のため、
空気循環及び圧迫コントロール用エアホールが設けられています。

MODE 1 騒音を完全に遮断する密閉モード


MODE 2 エアホールにより空気循環を可能にするオープンモード

- 案内**
- 製品を回転させてモードを変更できます。
 - 耳から製品を取り外した後にモードを変更することをお勧めします

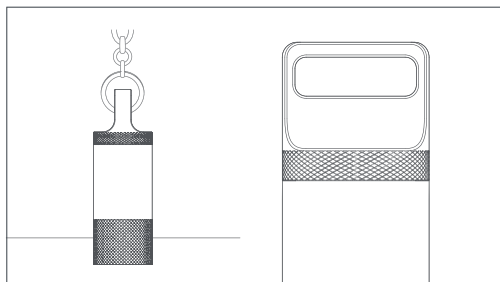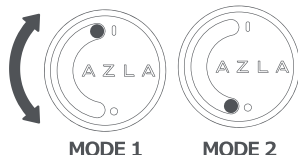

吊り下げ可能なデザインで鉤型フックなどを利用してケースを保管できます。

- 案内**
- 保管ケースは回して開閉する構造です。
(フタの内側のゴムリングが見えなくなるまで密閉してください)
 - 電気カーペットの上や直射日光など長時間の高温に筐体を晒さないでください。

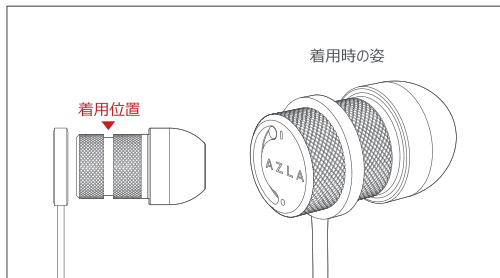

付属のイヤープラグストラップを使用することで紛失のリスクを軽減しつつ、フックなどに引っ掛けて使いやすくなることができます。

- 案内**
- 付属ストラップの両側の開口部を耳栓本体の湾曲に合わせて装着し、ストラップを首にかけて着用します。

プレミアムイヤープース - SednaEarfit

さまざまなイヤーチップのサイズを試して、自分の耳に最適なものを見つけてください。

装着したまま大声で話したときにかすかに声が聞こえれば適切なサイズと判断できます。

そうでない場合は、別のサイズのチップを選択してください。(イヤープースは左右どちらでも使用できます)

※POM1000には、開封時MAX StandardイヤープースM sizeが装着されています。


※効果的に騒音を遮断するために、必ず耳のサイズに合うイヤープースに交換してください。

※右側のガイド画像をご覧ください。

イヤープースサイズ
選択ガイド▶



SednaEarfit XELASTEC

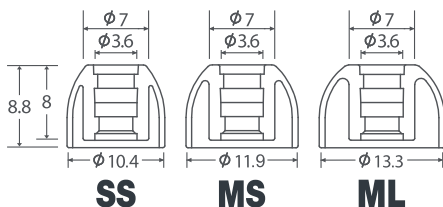

イヤープース洗浄法

1. 本体からイヤープースを外して常温の水でやさしくなでるようにホコリや汚れを落としてください。

2. 洗浄した後は水気を拭き取った後、自然乾燥させてください。
(直射日光や温度、湿度が高い場所で製品を乾燥させないでください)

※ 汗をたくさんかいた場合は、1日1回の洗浄をお勧めします。

イヤープース交換方法

1. イヤープースの端を指2本でつかみ、片方に押しながら抜きます。
(注意: イヤープースの羽の部分をつかんで外すとイヤープースが損傷する可能性があります)
2. 新しいイヤープースをイヤホンノズルの上に置いた後、親指で押し込みます。
3. イヤープースを回し位置を合わせて固定させます。

XELASTEC復元方法

1. 摂氏80度以上の水を準備してコップ(紙コップの1/3程度)に注ぎます。
2. 変形したXELASTECをひっくり返して準備された水に1分ほど入れてください。
3. 冷たい水に30秒ほど放置した後、取り出して水気を拭き取ります。
4. 直射日光の当たらない常温で乾燥させます。

※本手順で復元できるのはXelastec製品のみです。

※Xelastecイヤーチップを裏返して、指示に従って復元手順を進めてください。

イヤーチップを裏返さないで元に戻らなかったり、大きく歪んだりすることがあります。

※復元作業中は熱湯でも安全に使用できるカップをご利用ください。


※熱湯を使用する際はやけどなどにご注意ください。

※XELASTECは温度によって形状が変化する性質上、就寝中に使用すると

長時間の高い温度、圧力により元に戻らない場合があります。

※使用目的に合わせてイヤープースを変更してお使いください。

SednaEarfit max Standard

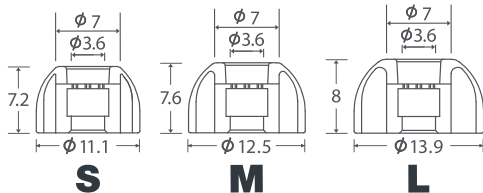

この製品をご使用になる前に必ずお読みください。 指針に従わず損傷が生じた場合は、保証は適用されません。

- 1.ご使用前に、マニュアルを必ず読み、正しくご使用ください。
- 2.マニュアルを読んだ後はいつでも見られる場所に保管してください。
- 3.すべての警告に注意してください。
- 4.すべての指示事項に従ってください。
- 5.乾いた布で掃除してください。
- 6.すべてのサービスについては、訓練を受けたサービス担当者にお問い合わせください。
- 7.マニュアル内のスペルミスや不正確な内容、構成品などは
AZLA Inc.によって事前予告なく変更されることがあります。

- 注意**
- ・本製品は防水仕様ではありません。水洗いしないでください。
 - ・水、アルコール、ベンゼン、潤滑油などがつかないようにしてください。
 - ・製品に潤滑油を塗布しないでください。
 - ・任意に製品を分解/調整または修理しないでください。
 - ・製品を高い場所から落とさないでください。
 - ・過度な力を加えないようにしてください。
 - ・過度の熱、可燃性物質から遠ざけてください。
 - ・直射日光、電気長板などの熱に長時間晒さないでください。
 - ・お子様の手の届かないところに保管してください。
 - ・小さな部品を乳幼児が飲み込まないように注意してください。
 - ・医療機器の移植を受けたユーザーは、医師に相談してから使用してください。
 - ・製品を廃棄するときは、環境保護にご注意ください。

保証書

※下記のように保証します。保証期間は購入日から1週間です。

- 1.本製品は厳密な品質管理および検査過程を経て作られた製品です。
- 2.消費者の正常な使用状態で保証期間内に発生した故障については、
無償修理を適用します。
- 3.保証期間が過ぎた場合及び保証期間以内であっても有償サービス
案内に該当する場合は、サービス料がかかります。
- 4.修理を依頼されるときは、必ず保証書を提示してください。
- 5.保証書は再発行されませんので、保管に注意してください。
- 6.保証書は日本国内でのみ有効です。
- 7.AZLA Inc.は、消費者基本法による消費者紛争解決基準を遵守します。
- 8.本製品の品質保証は、保証書に記載された内容で保証されます。

※本体を除いたアクセサリ類(イヤークーピー、ポーチなど)は保証対象外となります。
※製品の仕様、デザイン、構成品およびマニュアルは予告なく変更することがあります。

製品仕様

タイプ	イヤークーピー (Black / Gunmetal)
サイズ	プラグ長16.8mm / ケース58.3mm
重量	プラグ+イヤークーピー4.7g / プラグ+イヤークーピー+ケース19.6g
材質	アルミ

顧客情報 名前：
連絡先：
住所：

製造会社 AZLA Inc.
332, Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
02.539.1950